



Jetzt im neuen Funktionsumfang!

Mit unserer überarbeiteten DIAMantApp möchten wir Ihnen eine Anwendung zur Verfügung stellen, mit der Sie Ihre Blutzuckerdaten aus dem GlucoCheck GOLD Blutzuckermessgerät digital erfassen können.

Neben dem einfachen Importieren der Blutzuckerwerte via Bluetooth gibt es die Möglichkeit, diese Werte um Ihre Ernährungsgewohnheiten, sportlichen Aktivitäten und weitere Gesundheitsdaten wie Medikation, Blutdruck, Puls und Gewicht zu ergänzen. Die von Ihnen übertragenen Blutzuckerwerte werden in Form einer Tagesübersicht und einer 7-Tagesübersicht in der DIAMantApp abgebildet. Sie sehen auf einen Blick, wie viele Messwerte im von Ihnen voreingestellten Zielbereich und außerhalb liegen. Durch den neuen PDF-Export erhalten Sie sämtliche in die App eingegebenen Werte tabellarisch aufbereitet.

Erfahren Sie mehr über die Funktionen der DIAMantApp:




1. Startseite

Wir haben uns bei der Startseite der DIAMantApp bewusst dazu entschieden, ausschließlich die Punkte „Manuelle Dateneingabe“ und „Bluetooth-Übertragung“ in den Mittelpunkt zu stellen, um eine intuitiv einfache Bedienung der App zu gewährleisten.


Die unten angelegte Navigationsleiste führt Sie durch die gesamte App. Je nach Auswahl gelangen Sie in die Bereiche „Dateneingabe“, „Mein Profil“, „Meine Werte“ und „Mehr“.

Das dazugehörige Icon wird in der Navigationsleiste hervorgehoben. Dadurch wissen Sie immer, in welchem Bereich der DIAMantApp Sie sich gerade befinden.

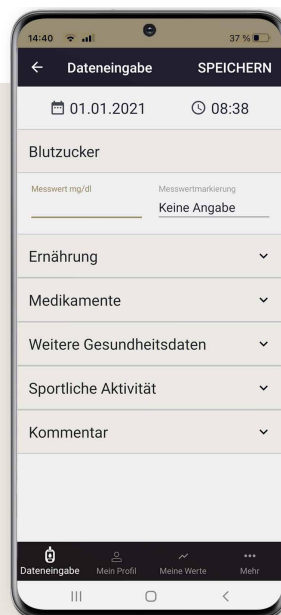

1.1 Manuelle Dateneingabe

Gehen Sie auf „Manuelle Dateneingabe“, es öffnet sich eine Eingabemaske, beginnend mit dem Blutzuckerwert und der Messwertmarkierung. Datum und Uhrzeit werden tagesaktuell angezeigt, können jedoch individuell angepasst werden. Das Ergänzen des Blutzuckerwertes um weitere Daten ist ein „Kann“ aber kein „Muss“. Sie können hier entscheiden, welche zusätzlichen Werte Ihrem Blutzuckerwert hinzugefügt werden sollen. Ihre eingetragenen Daten sichern Sie anschließend über „SPEICHERN“. Die hinterlegten Eingaben finden Sie unter „Meine Werte“ wieder.

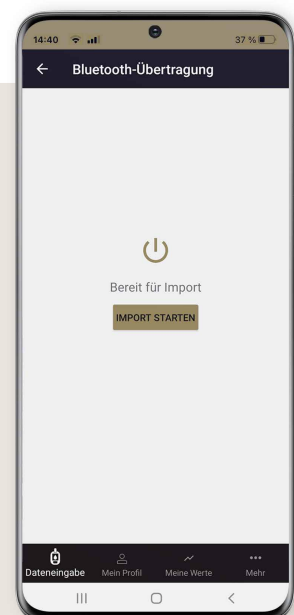

1.2 Bluetooth-Übertragung

Ein Import Ihrer Blutzuckerwerte aus dem GlucoCheck GOLD ist via Bluetooth möglich. Dies erfolgt über den Button „Bluetooth-Übertragung“.

Um das GlucoCheck GOLD mit der App zu verbinden, ist es erforderlich, die letzten vier Ziffern der Seriennummer Ihres Gerätes in die App einzutragen.

Hinweis: Stellen Sie zuvor sicher, dass die Bluetooth-Verbindung an Ihrem GOLD-Gerät eingeschaltet ist. Anschließend gehen sie auf „fertig“ und „IMPORT STARTEN“.


Ihre Messwerte werden jetzt in die DIAMantApp übertragen. Die vom GOLD-Gerät importierten Blutzuckerwerte finden Sie unter „Meine Werte“.





DIAMantApp – das digitale Blutzuckertagebuch für Ihr GlucoCheck[®] GOLD

Diabetes-Management

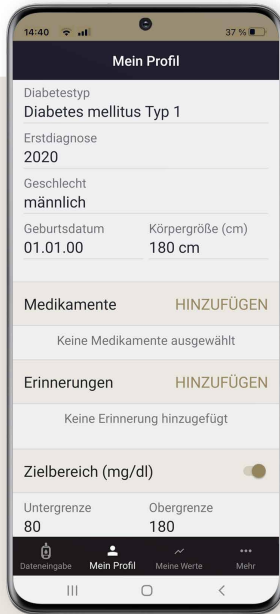

2. Mein Profil


Hinweis: Die im Profil hinterlegten Angaben werden automatisch gespeichert.

2.1 Basiswerte

In diesem Bereich können Sie Ihren Diabetestyp, den Zeitpunkt Ihrer Erstdiagnose, Ihr Geschlecht, Ihr Geburtsdatum sowie Ihre Größe hinterlegen.

2.2 Medikamente

Über „HINZUFÜGEN“ können Sie die Medikamente, die Sie regelmäßig nutzen, auswählen und hinterlegen. Die App verfügt über eine umfangreiche Anzahl an gängigen Insulinen und Tabletten. Mit der Suchfunktion wird das Auffinden der Tabletten oder Insuline erleichtert. Sollte ein Medikament nicht aufgelistet sein, können Sie dieses über das „Plus-Symbol“ ergänzen. Die von Ihnen unter „Mein Profil“ hinterlegten Medikamente werden anschließend in der Dateneingabemaske zur Auswahl angezeigt.

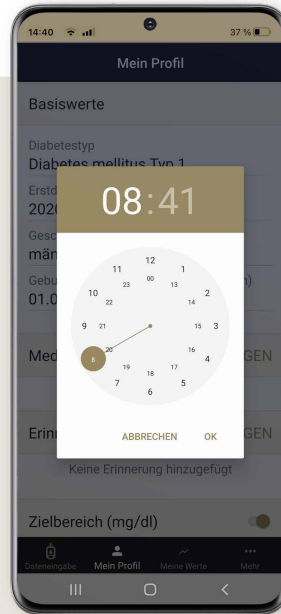

2.3 Erinnerungen

Lassen Sie sich von der DIAMantApp an Ihre nächste Blutzuckermessung erinnern!

Über die Erinnerungsfunktion können Sie Uhrzeiten eingeben, an denen Sie Ihre nächste Blutzuckermessung durchführen möchten. Die App erinnert Sie via Push-Nachricht oder Signalton an Ihre Blutzuckermessung – keine Messung mehr verpassen!

2.4. Zielbereich

Sie können in der DIAMantApp Ihren persönlichen Zielbereich hinterlegen. Dadurch werden sämtliche Blutzuckerwerte in den Tabellen und Diagrammen analog zum hinterlegten Zielbereich abgebildet.

Wichtig: Bevor Sie Ihren persönlichen Zielbereich unter „Mein Profil“ hinterlegen, stimmen Sie diesen bitte zunächst mit Ihrem behandelnden Arzt ab.



3. Meine Werte

Unter „Meine Werte“ werden Ihnen Ihre Daten angezeigt. Sie können zwischen einer Tages- bzw. 7-Tagesübersicht, einer tabellarischen Übersicht und der Gesamtübersicht wählen.

3.1 Tagesübersicht

Die Tagesübersicht gibt Ihnen Auskunft über die an einem Tag gemessenen Werte. Den Tag können Sie oben rechts über das Anwählen der drei Punkte eigenständig festlegen. Oberhalb des Diagramms finden Sie Ihren Zielbereich, den Sie unter „Mein Profil“ hinterlegt haben und die Anzahl der Messungen, die „Über“, „Innerhalb“ oder „Unter“ Ihrem Zielbereich liegen.

Somit haben Sie alle Tageswerte auf einen Blick zusammengefasst. Tippen Sie die Werte im Diagramm an, um Informationen zu Uhrzeit und Messwertmarkierung zu erhalten.





3.2 7-Tagesübersicht


In der 7-Tagesübersicht werden die Blutzuckerdaten der vergangenen 7-Tage grafisch abgebildet.

Sie finden, wie bei der Tagesübersicht, die Werte in „Über“, „Innerhalb“ und „Unter“ dem Zielbereich eingeordnet, wieder.

Ebenfalls lassen sich die einzelnen Messpunkte anwählen, um Details zu einer Messung zu erhalten.

Der Zeitraum für die 7-Tagesansicht kann von Ihnen individuell eingestellt werden.

Hinweis: Sowohl die Tagesansicht als auch die 7-Tagesansicht verfügen über eine „Zoom-Funktion“, mit der Sie das Diagramm vergrößern können, ziehen Sie dafür einfach das Diagramm mit zwei Fingern auf dem Display auseinander.

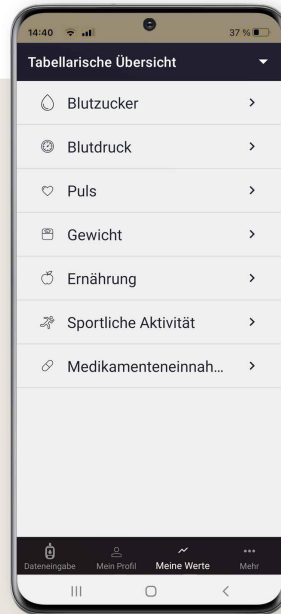

3.3 Tabellarische Übersicht

Ihre vom GlucoCheck GOLD importierten oder manuell eingegebenen Daten können auch in tabellarischer Form dargestellt werden.

In der Tabelle „Blutzuckerwerte“ werden die Werte analog zum eingegebenen Zielwert farblich (grün, rot, blau) gekennzeichnet. Hier finden Sie zudem eine Auflistung Ihrer Blutzuckerwerte in „Über“, „Innerhalb“ und „Unter“ dem Zielbereich.

PDF-Export: Sie können eine Tabelle mit allen Werten herunterladen. Wählen Sie dazu die drei Punkte oben rechts an und gehen auf „Exportieren“. Es öffnet sich ein Feld, in dem Sie den Zeitraum für den Export auswählen können.

Anschließend erhalten Sie eine PDF-Datei, die Sie z. B. zur eigenen Dokumentation ablegen oder per E-Mail an Ihren Arzt weiterleiten können.



3.4 Gesamtübersicht

In der Gesamtübersicht werden Ihnen zusammenfassende Angaben zu Ihren eingegebenen Daten angezeigt. Sie können voreingestellte Zeiträume oder einen individuellen Zeitraum auswählen.

PDF-Export: Folgende Daten können aus der Übersicht generiert werden:

Blutzucker Anzahl Messungen, niedrigster/höchster Wert, Anzahl Werte über/unter/im Zielbereich

Puls Anzahl Messungen, niedrigster/höchster Wert


Blutdruck Anzahl Messungen, niedrigster/höchster Wert

Gewicht Anzahl Messungen, niedrigster/höchster Wert

sportliche Aktivität Anzahl Aktivitäten, durchschnittliche Zeit

Ernährung durchschnittliche Nahrungsaufnahme



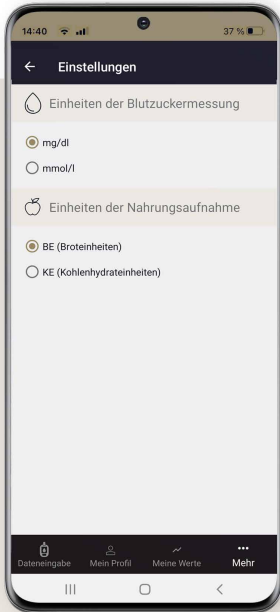

4. Mehr

4.1 Einfügen

Unter „Einstellungen“ können Sie die Einheit des Blutzuckerwertes festlegen. Sie können zwischen mg/dl und mmol/l wählen. Die hier eingestellte Einheit wird von der App übernommen. Neben der Einheit des Blutzuckerwertes kann unter „Einstellungen“ auch die Einheit bezogen auf die Nahrungsaufnahme festgelegt werden. Sie können zwischen Broteinheiten (BE) und Kohlenhydrateinheiten (KE) wählen.

